



**Назальный aspirатор детский ФИЗИОМЕР®** позволит быстро, бережно и гигиенично удалить из носа ребенка излишки слизи, эффективно устранить заложенность носа и обеспечить ровное и свободное дыхание.

**Применение :**

- Перед первым использованием промойте **назальный aspirатор детский Физиомер** горячей водой.
- Вставьте защитный фильтр в нижнюю часть накопителя слизи и закройте его.
- Уложите ребенка на спину так, чтобы он лежал ровно и ему было удобно.
- Поместите мягкий наконечник назального aspirатора у входа в носовое отверстие ребенка и вдохните через мундштук.
- Повторите то же самое с другим носовым отверстием.

Выбросьте фильтр после каждого применения.

После каждого использования сполосните назальный aspirатор горячей водой и тщательно высушите.

Меняйте фильтры после каждого применения во избежание риска повторного инфицирования.

Запасные фильтры продаются в аптеках упаковками по 20 штук.

Для достижения лучших результатов и разжижения излишков слизи рекомендуется перед применением aspirатора использовать **спрей назальный для детей ФИЗИОМЕР**.

**Условия и срок хранения**

Не стерилизовать. Не кипятить.

Хранить при комнатной температуре. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Производитель:**

«Лаборатория де ля Мер», 35400 Сент-Мало, Франция,

**Претензии потребителей направлять ООО «Биттнер Фарма»**

127018 Москва, Сущевский вал, 18, тел: 8800-250-17-35,

[www.omega-bittner.ru](http://www.omega-bittner.ru)

РУ в РФ: ФСЗ № 2009/05285 от 21.09.2012

№ серии и годен до: см. на упаковке